

Composizione del materiale

70% Poliammide

30% Elastomero (gomma naturale)

Gomma naturale

La gomma naturale tecnologicamente molto raffinata rende TRADITIONAL efficace in ogni occasione.

L'esclusiva elasticità e la pressione costante durante tutta la giornata garantiscono un trattamento efficace della grave malattia venosa garantendo risultati terapeutici ottimali.

Cura:



Lavare ogni giorno a mano o in lavatrice (ciclo delicato) a max. 40 gradi in un sacchetto da bucato.



Consigliamo di utilizzare il detersivo delicato SIGVARIS WASHING SOLUTION. Non utilizzare ammorbidenti!



Non inserire le calze in una asciugatrice a causa della carica elettrostatica e del surriscaldamento. Comprimere le calze tra due asciugamani asciutti e farle asciugare lontano dalla luce solare in un ambiente aerato. Non asciugare sul termosifone.



Non stirare.



Non lavare a secco. Non utilizzare sostanze chimiche.

Calza alla coscia con bordo autoreggente:

La pelle umana secerne sudore, sebo e forfora cutanea. La superficie in silicone del bordo autoreggente quindi richiede una cura particolare. Pulire le superfici di silicone di volta in volta con SIGVARIS CLEAN PAD per una migliore aderenza.

Calza alla coscia con cintura:

Si prega di chiudere con cura prima del lavaggio la chiusura in velcro, in modo che l'intera superficie della cintura sia coperta.

Attenzione:

Unghie appuntite e anelli con bordi taglienti causano rapidamente difetti. Per evitare questi inconvenienti, prestate molta cura mentre indossate e sfilate le calze e usate sempre i guanti in gomma!

Non tagliate eventuali fili sporgenti all'interno della calza.