

Avvertenza

Il riutilizzo di questo prodotto monouso può comportare un rischio potenziale per l'utente. Trattamento, detersione, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche del prodotto, il che a sua volta determinerebbe un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per il paziente.

Attenzione

Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o altre perdite che possono verificarsi se il prodotto viene usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

Indicazioni

Catetere esterno maschile.

Come usare la guaina urinaria autosigillante Security+



- Radere i peli pubici se necessario.
- Lavare e asciugare l'area del pene.

1. Per aprire la confezione, strappare da un'estremità all'altra.



2. Reggere l'applicatore con due dita per agevolare il posizionamento. Collocare la guaina sul glande, tenendo una distanza di 1 cm tra il glande e il tubo di uscita. Usare l'altra mano per tirare lentamente la linguetta verso di sé, srotolando la guaina delicatamente e in modo regolare.



3. Rimuovere l'applicatore.



4. Esercitare una leggera pressione sul corpo del pene per assicurare la perfetta adesione della guaina. Non è necessario aggiungere adesivo. La guaina può restare in posizione per 24 ore prima di essere cambiata e non deve essere applicata più volte.



5. Connettere la guaina a una sacca per urina Conveen. La guaina è dotata di un anello all'estremità dell'uscita, per agevolare la presa quando si collega la sacca per urina.