



GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

EFFECT 100 MATERASSO AD ACQUA

Manuale d'uso

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

USO PREVISTO

- Sovramaterasso statico.
- Realizzato in PVC pesante per assicurare lunga durata e massimo del comfort.
- 3 scomparti indipendenti per un miglior adattamento della sagoma del corpo e valvola di sovrappressione.
- La struttura pneumatica esterna assicura supporto e sicurezza in più.

PRIMA DELL'USO


1. Disimballare il contenuto dalla confezione.
2. Verificare tutti i pezzi:
 - A. Struttura base x 1
 - B. Scomparti acqua x 3
 - C. Pompa a mano x 1
 - D. Tubo acqua x 1
 - E. Istruzioni per l'uso x 1
3. Ispezionare visivamente qualsiasi eventuale danno (per es. fori).
4. Assicurarsi che il dispositivo (ovvero la struttura del letto) o la superficie su cui si prevede di poggiare il materasso sia abbastanza forte e resistente da reggere sia il peso dell'acqua nel materasso sia il peso dell'utente.
5. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

INSTALLAZIONE

1. Posizionare la struttura pneumatica di base principale su una superficie piana ed omogenea.
2. Utilizzare la pompa a mano fornita in dotazione per gonfiare la struttura pneumatica, connettendo le valvole dell'aria. Attenzione! NON gonfiare eccessivamente. La struttura pneumatica deve diventare abbastanza rigida da supportare in tutta sicurezza i 3 scomparti riempiti d'acqua.
3. Riempire i 3 scomparti acqua indipendenti con comune acqua di rubinetto.

Attenzione! NON riempire eccessivamente di acqua gli scomparti. Prendere in considerazione il peso e l'altezza dell'utente. Il volume ideale deve essere tale da sostenere senza problemi il peso dell'utente, senza afflosciarsi, con il materasso saldamente sorretto dalla struttura del letto. Procedere secondo il buon senso e razionalmente.

COMPONENTI DEL MATERASSO E PARTI ILLUSTRATE

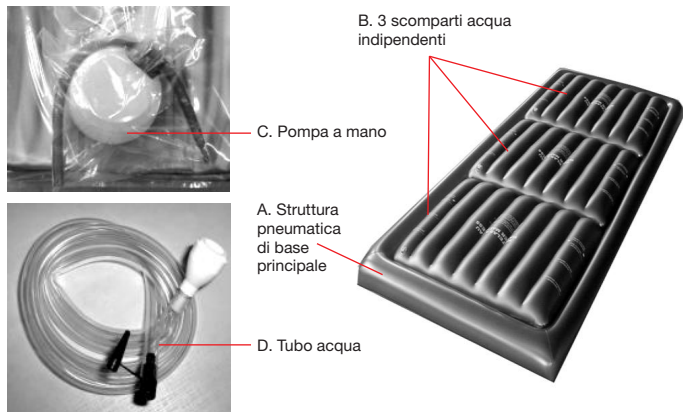

ATTENZIONE

1. NON collocare il materasso in prossimità di spigoli vivi o oggetti come coltelli.
2. NON collocare il materasso in prossimità di cavi esposti/aperti o elettrodomestici.
3. NON saltare o balzellare sul materasso e non permettere ai bambini di servirsene come giocattolo.
4. NON spostare o trasferire il materasso con gli scomparti riempiti d'acqua. Prima degli spostamenti svuotare l'acqua dagli scomparti.
5. **IL MATERASSO NON È UN DISPOSITIVO O MEZZO DI GALLEGGIAMENTO E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO A TAL FINE**

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA

- Utilizzare un panno umido con prodotto detergente leggero o soluzione disinfettante e strofinare accuratamente.
- Non utilizzare soluzioni chimiche abrasive o corrosive.
- Non lavare in lavatrice.
- Non utilizzare asciugatrici per asciugare il materasso. Al fine di evitare la formazione di rugiada, utilizzare un panno di cotone soffice per asciugare il materasso oppure collocarlo in un ambiente all'aria aperta consentendo la sua aerazione fino alla completa asciugatura

SPECIFICHE TECNICHE

Effect 100 Materasso ad acqua
Materiale: PVC 0,40mm + K75
Dimensioni generali: 200 (lunghezza) x 93 (larghezza) x 11,5 cm (altezza)
Dimensioni degli scomparti acqua: 69 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 11,5 cm (altezza)
Peso: 3,5kg

