

GINOCCHIERA STARSAN POST-OP R.O.M.

La ginocchiera Post-Op STARSAN offre un sistema pratico e veloce di regolazione per la flessione/estensione, requisito essenziale per le ginocchiere Post-Op, con i seguenti vantaggi:

- Completa escursione graduata del R.O.M., sia per l'estensione sia per la flessione
- Semplicità d'uso del meccanismo di blocco e sblocco della regolazione R.O.M.
- Disponibilità nella versione "standard" e "open" (aperta), corta e lunga
- Barre laterali facilmente modellabili per il varo -valgo
- Possibilità di accorciare le barre laterali nelle varie fasi della riabilitazione
- Integrazione del sistema velcro di fissaggio con le barre laterali, così da permettere un efficace supporto ed un'ottima stabilità

Prima di indossare l'ortesi leggere attentamente le istruzioni per la corretta applicazione ed il buon funzionamento .


Indicazioni

Immobilizzazione o limitazione del raggio di movimento (R.O.M.) a seguito di interventi chirurgici:


- Ricostruzione del legamento crociato anteriore o posteriore
- Riparazione del legamento collaterale mediale e laterale
- Revisione meniscale

Come applicare la ginocchiera

1. Aprire completamente la ginocchiera, avvolgere il polpaccio e la coscia con il FOAM fissandoli sulla parte anteriore della gamba
2. Posizionare la barra laterale (esterna) allineando lo snodo (R.O.M.) con la rotula e la linea mediana della gamba. Il malleolo laterale ed il grande trocantere all'anca sono validi punti di riferimento per l'allineamento della barra con la linea mediana
3. Ripetere l'operazione con la barra mediale (interna) ed accertarsi che l'altezza dello snodo (R.O.M.) mediale sia identica di quello laterale

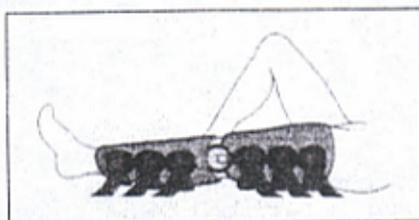

STARSAN POST OP ROM

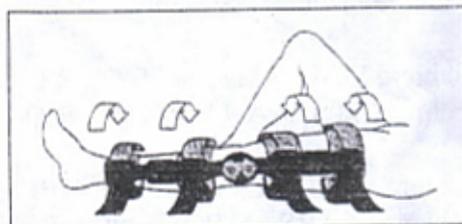

STARSAN POST OP OPEN ROM

4. Infilare le fascette negli appositi anelli fissando inizialmente le due fascette prossimali (più vicine) al ginocchio e, successivamente, le rimanenti
5. Per la rimozione dell'ortesi, slacciare le fascette ed aprire il FOAM che avvolge l'arto. L'ortesi può quindi essere rimossa e riapplicata senza necessità di disassemblarla completamente

Come regolare lo snodo (R.O.M.)

Premere facendo scorrere verso l'esterno e sollevare il dispositivo di fissaggio di sicurezza dello snodo (R.O.M.). Ruotare e rimuovere il sistema di bloccaggio (spinotto) e posizionarlo in corrispondenza del grado di flessione e di estensione desiderato. Ruotare in modo che il sistema di bloccaggio (spinotto) sia coperto e riabbassare il dispositivo di fissaggio di sicurezza dello snodo (R.O.M.).