

## *Sinaqua*™ Shampoo Cap

*Detersione dei capelli e del cuoio capelluto  
nel paziente immobilizzato*



### *Caratteristiche del prodotto:*

- ❖ Sinaqua™ Cuffia Shampoo riduce i rischi insiti nella detersione dei capelli e del cuoio capelluto in pazienti immobilizzati
- ❖ E' costituito da una cuffia monouso, impermeabile esternamente e rivestita internamente di un soffice tessuto imbevuto di una soluzione detergente
- ❖ La soluzione contenuta garantisce la detersione e una elevata pettinabilità dei capelli dopo il trattamento
- ❖ Priva di latex
- ❖ Priva di alcool
- ❖ Senza risciacquo
- ❖ L'elastico perimetrale aderisce al capo, evitando la fuoriuscita di liquido
- ❖ Monouso

### *Classificazione e codice CND:*

- ❖ Dispositivo Medico Classe I  
Codice CND: Z12040213  
Numero di repertorio: 56904/R



### *Ingredienti attivi:*

- ❖ *Aloe vera barbadensis estratto dalle foglie*
- ❖ *Fosfolipidi*
- ❖ *Pantenolo*

### *Caratteristiche tecniche:*

- ❖ Impermeabile esternamente
- ❖ Elastico perimetrale contenitivo
- ❖ Rivestimento interno in tessuto, ad alto spessore, 100% Viscosa. (100g/m<sup>2</sup>)
- ❖ Alto contenuto di soluzione per cuffia. (150 ml)

## ***Certificazioni e controllo ambientale:***

- ❖ Welcare è certificata :

*UNI CEI EN ISO 13485*

*UNI EN ISO 14001*

*UNI EN ISO 9001*

## ***Indicazioni d'uso:***

- ❖ Sinaqua™ Cuffia Shampoo, chiusa nella sua busta, può essere riscaldata alla temperatura desiderata in forno a microonde per non più di 15 secondi o immergendo la busta in acqua calda
- ❖ Assicurarsi di non riscaldare Sinaqua eccessivamente
- ❖ Posizionare la cuffia sul capo
- ❖ Per detergere i capelli, massaggiare per pochi minuti
- ❖ Togliere la cuffia e non risciacquare
- ❖ Asciugare i capelli con il metodo normalmente utilizzato

## ***Processo produttivo:***

- ❖ Manufatto in camera bianca ISO 8 secondo le GMPs
- ❖ Prodotto sottoposto a controlli di Bioburden e Patogeni ( *S. aureus*, *C. albicans*, etc...)

<b><i>Codice :</i></b>	<b><i>Descrizione :</i></b>	<b><i>Confezione di Vendita :</i></b>
<b><i>95200</i></b>	<b><i>Sinaqua™ Shampoo Cap 1busta: 1 cuffia</i></b>	<b><i>1 scatola: 30 buste</i></b>

### ***Maggiori informazioni :***

*Sito Web : [www. easyderm.net](http://www.easyderm.net)*

*Numero verde : **800 23 28 50***

*Servizio Clienti : [com@welcaremedical.com](mailto:com@welcaremedical.com)*

**Welcare Industries S.p.A**  
Orvieto, Italia